



















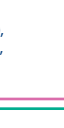









Gör så här

Verkningstid

Blandning

Lagring

Instrumentdesinfektion Art.nr: 734 340 (2 L) 	Efter avslutad användning skall instrumenten läggas i lösningen. Var noga med att alla instrument är täckta med lösning. Efter verkningstid, skölj noggrant med (destillerat) vatten. Aldehyd- och fenolfritt medel för avlägsnande av blod, sekret, fett och proteiner. Ej för känslig legering	2%: - 5 min (bakt., virus) - 15 min (fungi) 4% (vid kraftigt smutsat gods) Överskrid ej rek. tid	2% = 20 ml/1l vatten 4% = 40 ml/1l vatten	Färdig brukslösning kan användas upp till 7 dygn beroende på nyttjande/föreningensnivå. Byt vid behov 
Roterande instrument Art.nr: 734 341 (2 L) 	Instrumenten läggs i lösningen. Lyft upp och låt gods torka på papper eller på ren trasa, skölj EJ med vatten. >99% biologiskt nedbrytbar, aldehyd- och fenolfri För material kompatibla med alkaliska lösningar, ej till mässing, koppar, aluminium eller färgkodade instrument.	Minimum 5 min (bakt., virus) Max. 60 min (fungi) Överskrid ej maximal rekommenderad tid	Färdig brukslösning	Byt lösningen dagligen och vid behov.  
Avtryck Art.nr: 734 307 (1 L) 	Lägg avtrycket i brukslösningen. Var uppmärksam på att alla delar är täckta med den desinficerande lösningen. Efter verkningstiden, skölj noggrant med vatten. Får ej användas efter arbete med produkter som innehåller aminer!	5 minuter	Färdig brukslösning Hållbarhet öppen 1-2 veckor beroende på arbetets intensitet.	Förvaras i ett tätt tillslutet kärl vid temperatur över +5°C. 
Maskindiskmedel Art.nr: 733 028 (5 L) 	Avsett för dentala diskdesinfektorer. Lågalkaliskt, skonsamt mot aluminium. Anpassat för dentaltgods t.ex. instrumentbrickor m.m.		Manuell 25 ml/10 l vatten Automatisk se maskinleverantörens anvisning.	Stängd originalbehållare. Ej i direkt solljus, frostfritt i normal rumstemperatur. 
Torkmedel Art.nr: 733 029 (1 L) 	För alla typer av diskmaskiner och gods; glas, poslin, rostfritt, labutensiler. Motverkar kalk och rostbildning, ger en blank och fläckfri yta. Missfärgat gods blötlägges, rengöres och efterpoleras manuellt.		Sker automatiskt via doseringssystem	Stängd originalbehållare, ej i direkt solljus, frostfritt i normal rumstemperatur. 
Ultraljudsrengöring enzym Art.nr: 734 343 (2 L) 	Applicera brukslösningen i ultraljudsbadet och ev. i dess glasbägare. För bruk på icke-porösa ytor, låt luft tränga ut håligheter. Skölj därefter noggrant med vatten och torka av. Ej rekommenderat till plast- och gummidetaljer.	Minimum 15 min	3% = 30 ml/1l vatten	Plats avsedd för brandfarliga vätskor. Byt lösningen dagligen och vid behov.  
Enzymatiskt maskindiskmedel Art.nr: 734 344 (5 L) 	Trippelverkande desinficerande koncentrat avsett för dentala diskdesinfektorer. Skonsam pH-neutral lösning för effektiv borttagning av vävnad och fett 100% biologiskt nedbrytbar, aldehyd- och fenolfri	Program enligt med maskintillverkarens instruktioner	Automatisk, se anvisning från maskinleverantör	Originalbehållare. Ej i direkt solljus, frostfritt i normal rumstemperatur.
Sugrengöring Art.nr: 734 303 (1 L) 	Genomskölj av sugsystem utförs 1 gg/dag. Dispensera/sug upp brukslösning i sugsystem inklusive fontänskål. Efter rengöring, skölj noggrant med vatten. Biologiskt nedbrytbar, rester kan hällas i avlopp	5-10 minuter	2 % = 20 ml/1l vatten (ljummet/varmt vatten)	Förvaras som koncentrat i originalbehållare 
Handdesinfektion Gel Art.nr: 734 306 (1 L), 734 308 (75 ml), 734326 (600 ml) 	Tvätta händerna med tvål och vatten om händerna är synligt smutsiga. Tag 3-5 ml gel på torr och ren hud. Gnid in händerna, fingertoppar och mellan fingrarna noggrant. Låt lufttorka.	min 15 sek (i enlighet med SS-EN 1500:2013)	Färdig brukslösning	Plats avsedd för brandfarliga vätskor. Ej över +50°C. Håll borta från värmekällor inklusive solljus. Håll borta från oxiderade material samt starka syror. 
Allroundtvål Art.nr: 734 322 (1 L), 734 325 (600 ml) 	Blöt händer/ kroppen och tvåla in, skölj sedan bort lödder och tvålerester. Kan användas till hela kroppen.		Färdig brukslösning	Förvara i stängd förpackning i rumstemperatur. Hållbarhet 36 månader. Skyddas mot frost
Soft skin Hudkräm Art.nr: 734 327 (600 ml), 734 328 (250 ml), 734 332 (50 ml) 	Top Dent Soft Skin är en återfuktande kräm för daglig vård av hud. Den innehåller antioxidanter, fuktbalansbevarande substanser och antiinflammatoriska ämnen. Lätt parfymad.		Färdig brukslösning	Förvara i stängd förpackning i rumstemperatur. Hållbarhet 36 månader. Skyddas mot frost
Servett Art.nr: 734 305 	Öppna klaffen i toppen på det locket och dra ut servetten till den perforerade delen. Efter att ha rivit loss servetten stäng genast så undviker du att resterande servetter torkar. Stryk med servetten och låt ytan lufttorka.	30 sekunder	Färdig brukslösning på servett	Plats avsedd för brandfarliga vätskor. Ej över +50°C. Håll borta från värmekällor inklusive solljus. Håll borta från oxiderande material samt starka syror. 
Ytdesinfektion Art.nr: Oparfymrad (1 L), 735 571, 734342 Svag Apelsindoft 735 901 (1 L) 	Används outspätt på alla ytor som tål alkohol. Dränk en kompress med lösning. Stryk ut och torka flera gånger tills ytan blir ren. Låt lufttorka. Alkoholbaserad	min 30 sek	Färdig brukslösning	Plats avsedd för brandfarliga vätskor. Håll borta från värmekällor inklusive solljus.  
Skumtvätt Art.nr: 734323 (200 ml), 734324 (500 ml) 	Täck ytan som ska rengöras med skum. Torka bort med en torr trasa eller pappershandduk. Används för rengöring av läder eller konstmaterial (exv. vinyl). Ej alkoholbaserad	1 minut	Färdig brukslösning (spray/ pump)	Skydda mot extrem värme och kyla.
Sanitär Art.nr: 734321 (1 L) 	Spraya eller applicera på ytan med svamp. Skölj med vatten. Sanitär är ett surt, visköst antimikrobiellt rengörings- och desinfektionsmedel för sanitärt porslin, handfat, kakel och kakelfog. Sanitär kan även användas för att rengöra koppar, mässing, brons och rostfritt stål.	5-10 minuter	Färdig brukslösning	Produkten är irriterande. Använd skyddshandskar vid användning av produkten. 