

TOP DENT

ACTIVA™ BioACTIVE-RESTORATIVE™

Samverkar med tanden

PULPDENT®



Framtidens Regenerativa material nu i Dina Händer

BIOAKTIV FUNKTION

ACTIVA stimulerar apatitbildning och naturlig remineralisering i gränsytan mellan material och tand. Denna process stimulerar sammanväxning av restaurationsmaterial och tandstruktur vilket motverkar mikroläckage och skyddar mot sekundärkaries samt marginalmissfärgning.

NY VÅRDSTANDARD

ACTIVA är den första medlemmen i en ny generation estetiska, hållbara och slitstarka bioaktiva fyllningsmaterial som spelar en aktiv roll i bibehållandet av munhälsan genom frisläppning och återupptag av kalcium, fosfat och fluor.

APATITBILDNING FÖRSEGLAR OCH SKYDDAR TÄNDER

ACTIVA är ett "smart" material som reagerar på munhålets förändringar i pH med frisläppning och återupptag av ämnen som finns i saliv. Detta stimulerar bildning av ett skyddande och sammanbindande lager mineralapatit vilket är ett definierande krav för bioaktiva material.

ESTETISKT OCH HÅLLBART

ACTIVA är ett högestetiskt restaurationsmaterial med stor nötningsresistens som kan absorbera mekanisk stress på liknande sätt som naturliga tänder. Det minskar risken för "chipping" och ökar utmattningsåldern jämfört med konventionella material.

DINA PATIENTER I FOKUS

ACTIVA representerar en proaktiv väg till god tandhälsa som lägger betoning på långsiktig patientvård. Utveckla klinikens arbete med ACTIVA BioACTIVE produkter.

INGET BISFENOL A

ACTIVA är säkert för alla patienter. Produkterna innehåller inte Bisfenol A, inte Bis-GMA och inga Bisfenol A derivat.

PATENTERAD BIOAKTIV KEMI


Patenterat bioaktivt resin, patenterat stötupptagande resin och reaktiva glas-fillers resulterar i en kombination av fysikaliska och kemiska egenskaper utan motstycke. ACTIVA är fukttåligt, dimensionsstabil, dualhärdande och röntgenkontrasterande.

SNABBT OCH ENKLT ATT ANVÄNDA

Automix-spruta med böjbar kanyl för enkel applikation, för klass I, II, III and V restaurationer. Idealt för bulk-fill teknik.

THE DENTAL ADVISOR **+++++**
98% rating

ACTIVA BioActive-Restorative Two-year Clinical Performance

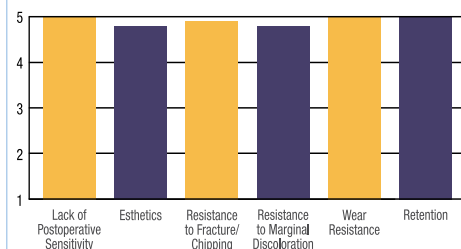

A restorative dentistry game-changing advancement. – Dr. Ted Croll

Activa is one of the best materials to hit the market in years. – Dr. Josh Wren



Färre steg ger enkelhet med ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE



Preparation följs av en 5-sekunders etsning. Efter sköljning tas överskottsvätska bort. Torka ej ut tanden.



ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE appliceras med böjbar metallkanyl.



Instrument används för att skapa anatomi.



Visar högglanspolerad restoration.

Bilder Dr. Mark Cannon

ACTIVA 47-månader återbesök



7 oktober, 2012

ACTIVA BioACTIVE-RESTORATIVE post-operativt.

Bilder Dr. John Comisi



9 september, 2016

47-månaders återbesök visar god estetik, ingen nötning eller "chipping" och ingen marginalmissfärgning.

Reparation av kariesangrepp under kronmarginal






Karies under marginal har tagits bort. 5-sekunders etsning och borttagning av vätskeöverskott ej visat.



ACTIVA binder till tanden, metall och keram vilket ersätter funktionen av saknad tandstruktur.

Bilder Dr. Robert Lowe

Fysikaliska egenskaper hos ACTIVA överträffar RMGIs och GIs och är jämförbara eller överträffar Kompositter

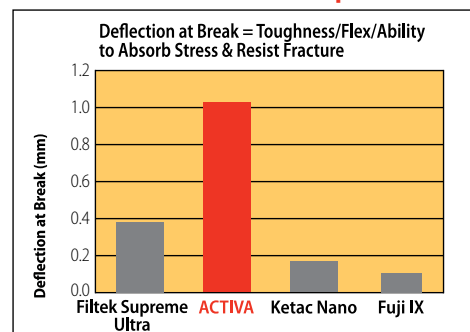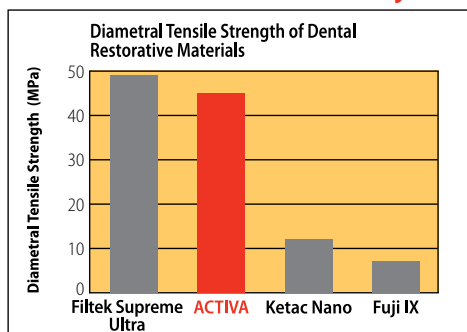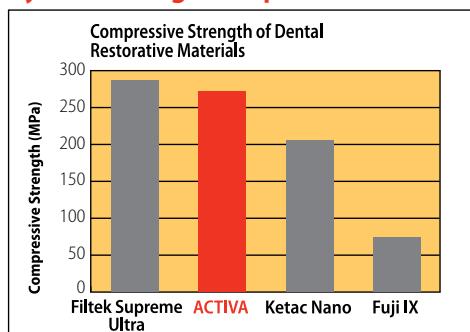

Filtek = Komposit; ACTIVA = Bioactive Restorative; Ketac Nano = RMGI; Fuji IX = Glasjonomer **Universitetstester**
Filtek, Ketac och Fuji IX är varumärken tillhörande 3M ESPE, 3M ESPE och GC resp.

ACTIVA™ BioACTIVE-RESTORATIVE™

Behöver ACTIVA-SPENSER™

- 681272- **Startkit:** 5ml/8gm spruta,
 - 681274 ACTIVA-SPENSER™ + 20 bl.spets böjbar kanyl
Startkit finns i A1, A2 och A3
 - 681275- **Refill:** 5ml/8gm spruta *
 - 681278 + 20 blandningsspetsar, 20G böjbar kanyl
 - 681279- **Valuepack:** 2 x 5ml/8gm spruta *
 - 681282 + 40 blandningsspetsar, 20G böjbar kanyl
- *Specificera: A1, A2, A3, A3,5

ACTIVA™ BioACTIVE/BASE-LINER™

ACTIVA-SPENSER™ är valfri för dispensering

- 681270 **Single Pack:** 5ml/7gm spruta
+20 blandningsspetsar 20G böjbar kanyl
 - 681271 **Valuepack:** 2 x 5ml/7gm spruta
+ 40 blandningsspetsar 20G böjbar kanyl
- Tillbehör**
- 821917 Dispenser för 5ml automix spruta
 - 821918 Automix blandningsspetsar böjbar metallkanyl, 20 st
 - 821919 Automix blandningsspetsar böjbar metallkanyl, 50 st

ACTIVA™ KIDS, BioACTIVE-RESTORATIVE™

Behöver ACTIVA-SPENSER™

- 681283 **Startkit:** 5ml/8gm spruta,
ACTIVA-SPENSER™ + 20 bl.spets böjbar kanyl
- 681284 **Refill:** 5ml/8gm spruta
+ 20 blandningsspetsar, 20G böjbar kanyl

Kontakta lokal säljrepresentant:



www.dabdental.se